



 Mepiform®



SafetaC
TECHNOLOGY

PRAVI IZBOR ZA TRETMAN OŽILJAKA


PRVI IZBOR FLASTERA OD SILIKONSKOG GELA

Mepiform je diskretan tanak i komforan flaster sa mekom silikonskom podlogom.

Prema međunarodnim preporukama flasteri sa silikonskim gelom bi trebalo da budu prvi izbor kod tretmana hipertrofičnih i manjih keloidnih ožiljaka.

Safetac
TECHNOLOGY

● MEKA SILIKONSKA PODLOGA (Safetac)
- meki silikon nežno prijanja na kožu
- minimalna trauma i bol pri uklanjanju

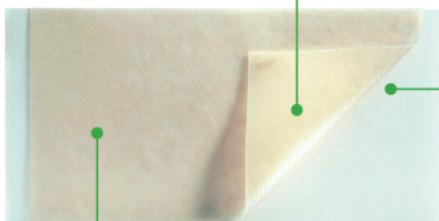


● ZAŠTITNI FILM
- štiti Safetac podlogu
- omogućuje sterilnu aplikaciju

● FILM/NETKANA PODLOGA SA ZADNJE STRANE
- tanki komforni netkani poliuretan i viskoza
- propustan na isparenja vlage
- vodootporan


Gladak, mekan i neprimetan

Mepiform sa mekanim silikonskim slojem Safetac ravna, smekšava i uklanja karakteristične crvene ožiljke koji su nastali kao posledica hirurške intervencije, posekotina, opekotina kao i hipertrofične i keloidne ožiljke, što ih čini manje vidljivim.

Mepiform se takođe može upotrebiti profilaktički da bi se izbeglo stvaranje preteranih formacija tokom perioda formiranja ožiljaka koji može trajati oko godinu dana.

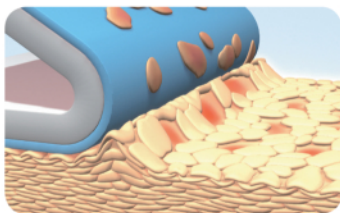

Flasteri sa tradicionalnim adhezivima uzrokuju perutanje (skidanje) kože

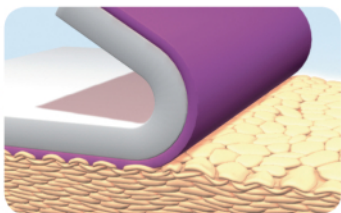


Flasteri sa Safetac tehnologijom ne izazivaju traumu rane ili okolne kože.

OŽILJCI

Ožiljci se uglavnom sastoje od proteina kolagena, koji je najčešće tkivo u telu. Neke rane ostavljaju ravne ožiljke koji nestaju posle nekog vremena, dok neki ostaju neravni i depigmentisani.

Primeri ožiljaka na kojima se može primeniti Mepiform

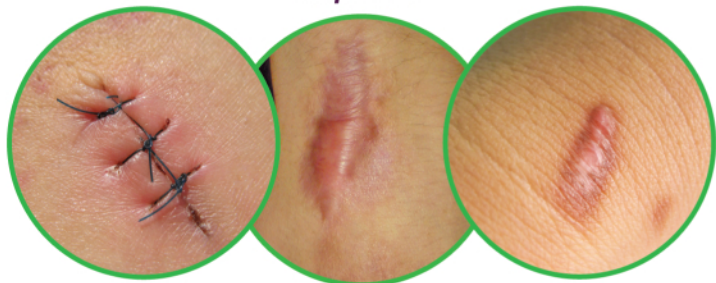

Zatvorene hirurške rane

Keloidni ožiljci

Hipertrofični ožiljci

HIPERTROFIČNI OŽILJCI I KELOIDI

Hipertrofični ožiljci i keloidi su neuobičajeni odgovori kože koja zarasta posle trauma, upala, vakcinacije i opekotina. Okarakterisani su kao preterana količina grudvastog tvrdog crvenog tkiva nalik užetu koje može da svrbi. Za razliku od hipertrofičnih ožiljaka, keloidi mogu da premaše područje rane.

TRETMAN OŽILJAKA

Postoji više vrsta tretmana hipertrofičnih i keloidnih ožiljaka:

- Hirurgija*
- Injekcije kortikosteroida*
- Pokrivka silikonskim gelom*
- Terapija pritiskom*

Pokrivka silikonskim gelom je široko rasprostranjen hemijski tretman hipertrofičnih i keloidnih ožiljaka. U prilog efikasnosti ovakvog tretmana postoji mnogo dokumentovanih dokaza, a efikasnost i bezbednost potvrđena je rezultatima proba.



KAKO UPOTREBLJAVATI MEPIFORM ?

Za prevenciju pojave ožiljaka kod osoba koje su podložne pojavi prekomernih ožiljaka, tretman flasterom sa silikonskim gelom trebalo bi da počne odmah po zarastanju rane.

Za optimalne rezultate, Mepiform treba upotrebljavati 24 sata, a sam tretman bi trebalo da traje od 3 meseca do jedne godine, u zavisnosti od stanja ožiljka.

Mepiform je samolepljiv, može se seći na željeni oblik i nije potrebna dodatna fiksacija. Voodootporan je i ne mora se skidati prilikom kupanja ili tuširanja, ali ga treba povremeno ukloniti da bi se koža pregledala i očistila. Isti Mepiform može se upotrebljavati do dve nedelje.

REZULTATI TRETMANA MEPIFORMOM

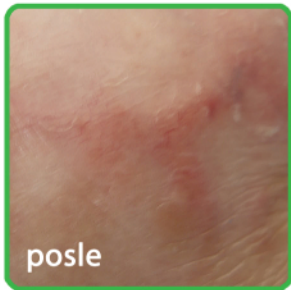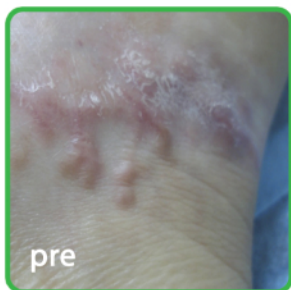

PITANJA KOJA SE ČESTO POSTAVLJAJU:

Kako upotrebom Mepiforma ožiljci postaju manje vidljivi?

Godine upotrebe različitih silikonskih flastera dokazali su da silikon čini ožiljke manje vidljivim.

Koji ožiljci se mogu tretirati?

Mepiform se može upotrebiti kod starih i novih ožiljaka, bilo da su crveni, depigmentisani i/ili neravni. Takođe se mogu tretirati hipertrofični i keloidni ožiljci.

Grudi, ramena i uši su vrlo osetljivi regioni gde se mogu formirati naglašeni ožiljci.

Da li tretman boli?

Ne uopšte. Meki silikon naleže nežno na kožu i stoga je aplikacija ili uklanjanje potpuno bezbolno.

Koliko dugo traje tretman?

Zависи od težine, veličine i oblika ožiljka. Najbolja poboljšanja se mogu videti kod crvenih ožiljaka. Kao profilaksa Mepiform se može upotrebljavati 3-6 meseci, u zavisnosti od stanja ožiljka. Tretman treba ponoviti ako ožiljak počne da svrbi, pocrveni ili se uzdigne iznad okolne kože. Keloidne ožiljke treba tretirati najmanje jednu godinu.

Da li će ožiljak nestati?

Mepiform je u upotrebi u bolnicama širom sveta.

Mepiform znatno poboljšava stanje ožiljaka.

Čak i ako ožiljak ostane, biće manje crven, manje će svrbeti i manje će se razlikovati od okolnog tkiva.

Može li se izlaziti na sunce sa Mepiformom?

Ako izlažete novi ožiljak suncu, povećavate rizik da ožiljak postane depigmentisan, što ćete izbeći zaštitom.

Mepiform ima UV zaštitu od sunca sa faktorm zaštite 7.7, ali treba obratiti pažnju da to nije dovoljno za potpunu zaštitu.

Mere opreza

Mepiform se može upotrebljavati samo na zatvorenim zaraslim ranama. Koža mora biti suva pri aplikaciji. Ako nastane svrab ili nelagodnost, ukloniti Mepiform i pročitati uputstvo za upotrebu.


UPUTSTVO ZA UPOTREBU MEPIFORMA :



Ukloniti zaštitni film.
Ako je potrebno,
isecite na željeni oblik.



Postaviti Mepiform
na ožiljak.

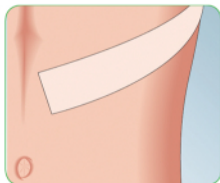

Postaviti ponovo po
čišćenju ožiljka.

PREDNOSTI MEPIFORMA:

- Bez dodatne fiksacije
- Mepiform je tanak, fleksibilan i diskretan
- Može se nositi pri svim dnevnim aktivnostima
- Može se ponovo primeniti
- Jedan Mepiform se može nositi sedam i više dana

VAŽNO

U slučaju pojave maceracije ili osipa, odmorite kožu dok simptomi ne nestanu. Nastavite sa tretmanom i postepeno povećavajte trajanje tretmana po danu. Ako se simptomi ponove, konsultovati lekara. Mepiform ima ultravioletnu zaštitu faktor 7.7.

● **Mepiform**[®] se pakuje u sterilnim pojedinačnim pakovanjima

Br. artikla	Veličina cm	kom./pak.	kom./trp.
293100	4 x 30	5	50
293200	5 x 7.5	5	25
293400	10 x 18	5	35



UVOZNIK I DISTRIBUTER :

"Celtis Pharm" d.o.o., Dalmatinska 115/27, Beograd
e-mail: office@celtispfarm.rs, **telefon:** +381117674233